


Bedienung Treppenlift

Die Punkte sind vor und nach jeder Benutzung auszuführen


1. Die **Sitzfläche** kann im vorderen Teil platzsparend nach oben geklappt werden.
2. Auch die **Fußstütze** lässt sich über einen entsprechenden Hebel wegklappen.
3. Die **Armlehnen** lassen sich unabhängig voneinander bewegen und geben Ihnen beim Ein- und Aussteigen zusätzlichen Halt.

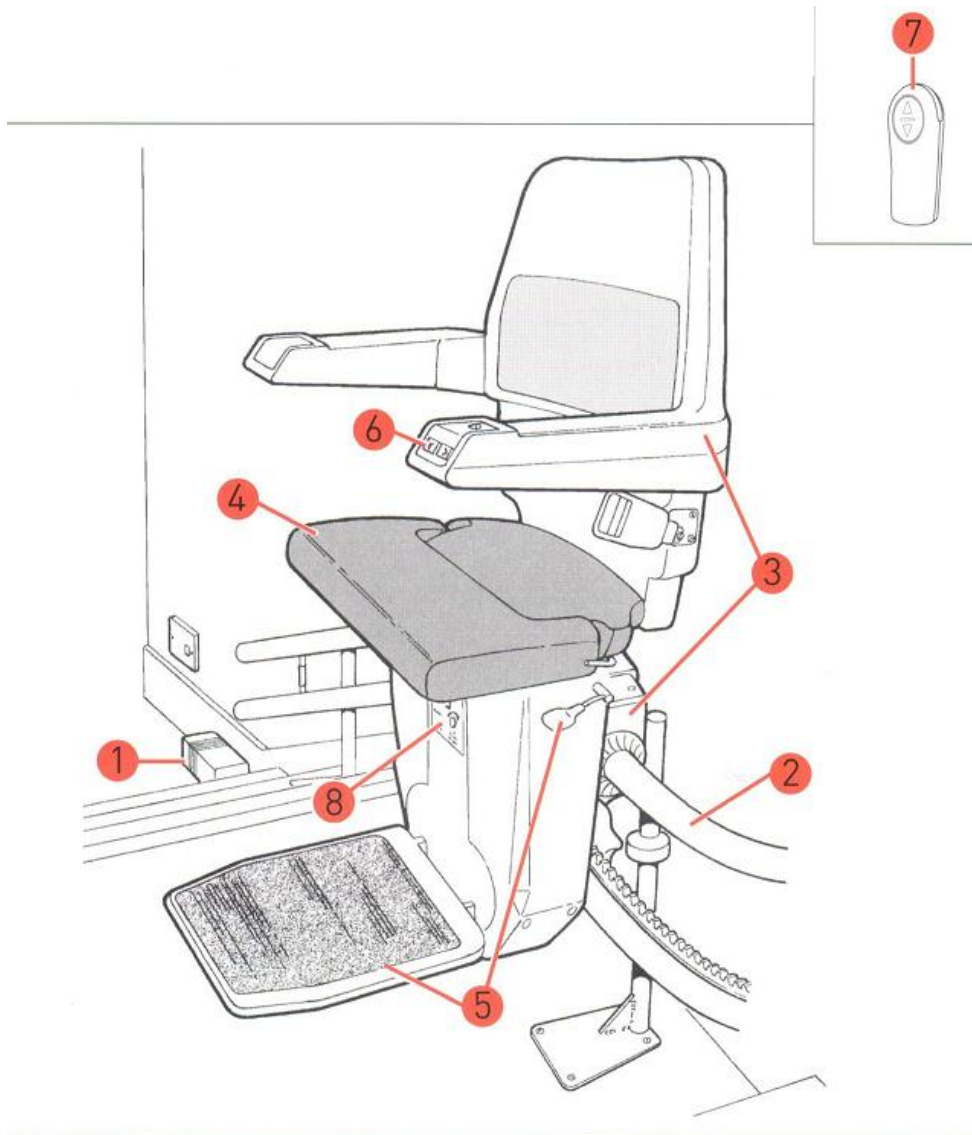


- ① Das **Ladegerät** stellt sicher, daß die Liftbatterien immer eine optimale Betriebsladung haben.
- ② Als **Führungsschiene** dienen stabile Metallrohre. Entlang dem Treppenlauf montiert, gewährleisten sie eine sichere Fahrt auf Ihrem Lifta.
- ③ Der komfortable Sitz Ihres Liftas ist bequem und mit der **Fahreinheit** fest verbunden. Der Stuhl darf nur von geschulten und autorisierten Service-Fachkräften entfernt werden.
- ④ Die **Sitzfläche** kann im vorderen Teil platzsparend nach oben geklappt werden.
- ⑤ Auch die **Fußstütze** läßt sich über einen entsprechenden Hebel wegklappen.
- ⑥ In einer der beiden **Armlehnen** befinden sich die Bedienelemente Ihres Liftas. Die Armlehnen lassen sich unabhängig voneinander bewegen und geben Ihnen beim Ein- und Aussteigen zusätzlichen Halt.
- ⑦ Zusätzlich erhalten Sie 2 **mobile** Fernsteuerungen, vergleichbar mit den Bedienelementen in den Armlehnen ⑥. Sinnvoll ist ein ständig gleicher Ablageplatz jeweils am unteren und oberen Treppenende.
- ⑧ Der Betriebsschalter für die **Akkus** sollte bei längerem Nichtgebrauch des Liftas – zum Beispiel, wenn Sie im Urlaub sind – auf die Position „0“ gestellt werden. Hierfür sollte sich Ihr Lifta stets in der oberen bzw. unteren Ladestation am Schienenende befinden.

Wichtige Hinweise vor der Benutzung


Bevor Sie Ihren Lifta in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte folgende Hinweise sorgfältig durch, und beachten Sie die Hinweise bei jeder Benutzung ihres Liftas.

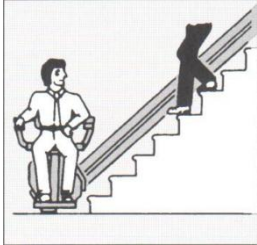


Bevor Sie losfahren, schauen Sie bitte, ob keine andere Person die Treppe gerade benutzen möchte.

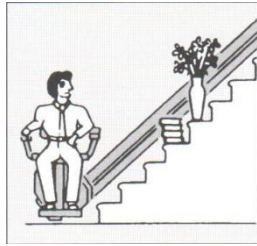


Prüfen Sie, ob sich keine Hindernisse auf der Schiene oder auf der Treppe befinden.

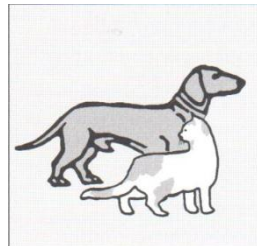

Achten Sie bitte darauf, dass Haustiere die Fahrt Ihres Liftas nicht behindern.

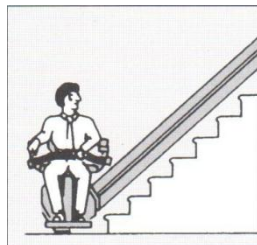


Falls an Ihrem Lifta ein Sicherheitsgurt montiert ist, legen Sie ihn an. Achten Sie bitte darauf, dass der Verschluss einrastet.

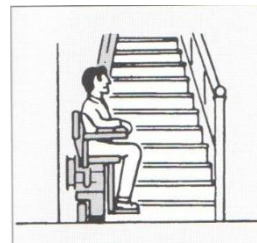

Lehnen Sie sich gut zurück, legen Sie den Arm auf die Armlehne, und stellen Sie die Füße auf das Fußbrett.



Vermeiden Sie, dass Kinder Ihren Lifta als Spielplatz nutzen. Für eventuelle Schäden in diesen Fällen können wir keine Haftung übernehmen. Zur Sicherheit benutzen Sie bitte den Schlüsselschalter in der Armlehne.

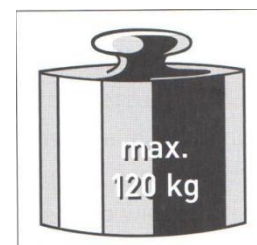


Denken Sie immer daran, dass die maximale Tragkraft Ihres Liftas 120kg beträgt.

Fernbedienung für Ihren Lifta


Mit den Fernbedienungen können Sie den Lifta oben und unten an der Treppe bedienen und zu sich bewegen, wenn der Lifta sich am anderen Ende der Treppe oder sich in der Mittelstation befindet.

Wird eine der beiden Tasten gedrückt, rotiert das Licht in der Fernbedienung und ihr Lifta wird in Bewegung gesetzt. Die Fernbedienungen sind mit Batterien ausgestattet.

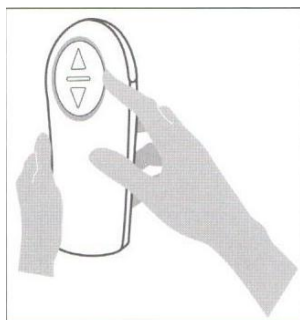


Sicherheitseinrichtungen Ihres Liftas

Um stets eine sichere Fahrt mit Ihrem Lifta gewährleisten zu können, sind einige Sicherheitsvorkehrungen fest in Ihrem Lifta eingebaut.

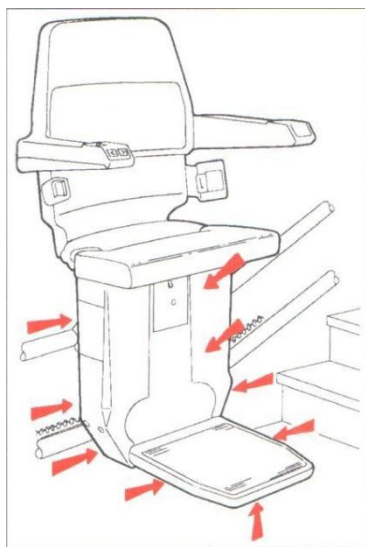

An jeder Seite der Fahreinheit, der Fußstütze und zusätzlich auch unter der Fußstütze sind druckempfindliche Schalter integriert. Diese stellen sicher, dass Ihr Lifta bei jedem Kontakt mit einem Hindernis augenblicklich seine Fahrt stoppt.

Sollte Ihr Lifta auf ein solches Hindernis stoßen und seine Fahrt automatisch unterbrechen, so drücken Sie einfach die Taste für entgegengesetzte Fahrtrichtung. Anschließend kann das Hindernis beseitigt werden, und Sie können Ihre Fahrt in die gewünschte Richtung fortsetzen.

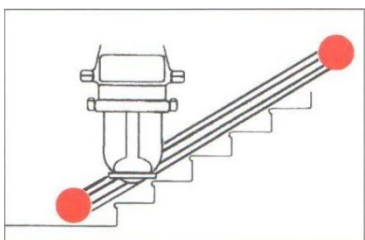

In den Schienen Ihres Liftas befinden sich am oberen und am unteren Ende Stopp-Schalter, die Ihre Fahrt automatisch beenden, wenn Sie das jeweilige Schienenende erreicht haben. Dies gewährleistet, dass Sie immer an der richtigen Ausstiegsposition Ihren Lifta sicher verlassen können.

Der Beckengurt



Ziehen Sie den Gurt mit einer gleichmäßigen Bewegung aus der Rolle, und drücken Sie das Ende in den Verschluss. Vermeiden Sie dabei, dass der Gurt vom Rollmechanismus zurückgezogen wird, da dieser dann ein weiteres Herausziehen verhindert. Sollte der Gurt sperren, so lassen Sie ihn einfach wieder ganz aufrollen und wiederholen den Vorgang. Um den Gurt wieder zu lösen, drücken Sie auf den roten Knopf und lassen ihn langsam aufrollen.

Sollte der Gurt zu stramm oder zu locker befestigt sein, so lösen Sie ihn wie oben beschrieben und lassen ihn einrollen. Anschließend ziehen Sie den Gurt gleichmäßig auf die gewünschte Länge und lassen ihn wieder einrasten. Der Gurt wird nun in dieser Position bleiben.